

نام ماده مورد نیاز جهت ضد عفونی کردن	زمان انجام ضد عفونی	وسایل و تجهیزاتی که باید گند زدایی و ضد عفونی شوند
الکل ۷۰ درصد محلول رقیق شده سطوح ۲ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح با نظر شرکت سازنده؛ دستمال مرطوب	بعد از هر بار استفاده در صورت عدم استفاده هر هفته یکبار	مانیتورها
ابتدا شستشو با یک ماده دترجنت و سپس استفاده از ضد عفونی کننده های High Level به مدت ۱۵- ۲۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و آبکشی و خشک کردن	بعد از هر بار استفاده در صورت عدم استفاده هر هفته یکبار	اتوسکوپ، لارنگوسکوپ و تیغه های آن
قبل و بعد از استفاده با الکل ۷۰ درصد ضد عفونی شود	اختصاصی برای هر بیمار	ترمومتر
ابتدا شستشو با یک ماده دترجنت و سپس استفاده از ضد عفونی کننده ابزار ۲ درصد به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و آبکشی و خشک کردن	بعد از هر بار استفاده	ماسک و آمبوگ
ابتدا شستشو با دترجنت ضد عفونی با محلول ابزار به مدت ۲۰ دقیقه	بعد از هر بار استفاده در صورت عدم استفاده هر هفته یکبار اتصالات یکبار مصرف است	ساکشن و اتصالات آن
الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح	بعد از هر بار استفاده	پروپ سونوگرافی
الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح محلول رقیق شده سطوح ۲ درصد	بعد از هر بار استفاده	چادر اکسیژن
الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح محلول رقیق شده سطوح ۲ درصد	بعد از ترخیص نوزاد	انکوباتور نوزاد
الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح ۲ درصد محلول رقیق شده سطوح	هر هفته	انکوباتور آزمایشگاه
الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح ۲ درصد محلول رقیق شده سطوح	روزانه	گوشی تلفن
استفاده از دستمال آغشته به الکل ۷۰ درصد اسپری ضد عفونی کننده سطوح	هفته ای یکبار در صورتی که بیمار عفونی باشد، بعد از ترخیص بیمار	فلومتر اکسیژن (مانومتر اکسیژن)
شستشو با ماده دترجنت و جرم زدایی با برس و سپس خشک کرده در جایش نصب گردد.	هفته ای یکبار در صورتی که بیمار عفونی باشد، بعد از ترخیص بیمار	فلومتر اکسیژن (محفظه آب)

ابتدا شستشو با دترجنت ضدعفونی با محلول رقیق شده ابزار ۲ درصد به مدت ۲۰ دقیقه الکل ۷۰ درصد	بلافاصله بعد از هر بار استفاده	قیچی و رسیور های غیر استریل
آب داغ و صابون وایتکس رقیق شده ۱۰ درصد الکل ۷۰ درصد	بعد از خالی شدن، ظرف را شسته و مجدد اقدام به پر کردن نمایید.	ظروف مایع صابون
الکل ۷۰ درصد	قبل از استفاده	گوشی پزشکی
با یک مایع دترجنت و خشک کردن	در صورت آلودگی خارج و شسته شده	کاپ فشارسنج
الکل ۷۰ درصد	هر هفته	یخچال ها
گردگیری	روزانه	قاب عکس ها و تلویزیون
آب و دترجنت	هر ۶ ماه	پرده ها
- شستشو با آب داغ ۸۲ درجه به مدت ۱۵ ثانیه - محلول هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد	روزانه	سطل زباله
ابتدا کشیدن دستمال آغشته به ماده دترجنت و سپس دستمال مرطوب و سپس محلول رقیق شده سطوح دو درصد یا اسپری ضدعفونی کننده سطوح یا محلول وایتکس ۱۰ درصد ضدعفونی گردد.	بعد از ترخیص بیمار در صورت آلودگی واضح بلافاصله تمیز شود	رویه پلاستیکی تشک
ابتدا کشیدن دستمال آغشته به ماده دترجنت و سپس دستمال مرطوب و سپس محلول رقیق شده سطوح دو درصد یا اسپری ضدعفونی کننده سطوح یا محلول وایتکس ۱۰ درصد ضدعفونی گردد.	بعد از ترخیص بیمار در صورت آلودگی واضح بلافاصله تمیز شود	میز غذاخوری و کمد کنار تخت
وایتکس رقیق شده محلول رقیق شده سطوح	در صورت آلودگی و نیز در هر شیفت : ابتدا جارو و سپس تی خیس و بعد از آن تی آغشته به ماده ضدعفونی کننده	زمین ، کف و دیوارها
شستشو با دترجنت الکل ۷۰ درصد اسپری ضدعفونی کننده سطوح محلول رقیق شده سطوح ۲ درصد	هر هفته در صورت آلودگی واضح بلافاصله تمیز شود.	پایه سرم ها
تمیز کردن با مواد شوینده(دترجنت) و خشک کردن	در صورت آلودگی واضح بلافاصله تمیز شود	سینک شستشو
تمیز کردن با مواد شوینده، و ضدعفونی گرمایی با آب داغ (۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد) و ضدعفونی در واحدهای زایمان و جراحی که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشد.	روزانه	حمام ها

تمیز کردن با مواد شوینده، و ضدعفونی گرمایی با داغ (۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد) به جزء در مواقع شیوع عفونت که نیاز به ضدعفونی با محلول ضدعفونی سطوح یک درصد یا محلول وایتکس ۲۰ درصد می باشد.	در هر شیفت یکبار در صورت آلودگی واضح در اسرع وقت	توالی ها
روزانه شستشو با دترجنت الکل ۷۰ درصد محلول رقیق شده سطوح اسپری ضدعفونی کننده سطوح	تمامی ترالی های موجود در بخش روزانه یکبار ترالی پانسمان بعد از اتمام پانسمان	ترالی ها
شستشو با آب ضدعفونی با محلول وایتکس ۱۰ درصد	در صورت چندبار مصرف بودن، بعد از استفاده	لگن و لوله های ادراری
ضدعفونی با محلول رقیق شده ابزار استریل در اتوکلاو	بعد از هر بار استفاده	لگن شستشوی زخم
شستشو با آب و دترجنت	بعد از هر بار استفاده	دستگاه بخور
شستشو با آب و دترجنت	بعد از هر بار استفاده	دستگاه شیر دوش
اختصاصی برای هر بیمار	یکبار مصرف	سوند اکسیژن
الکل ۷۰ درصد محلول رقیق شده سطوح اسپری ضدعفونی کننده سطوح با نظر شرکت سازنده دستمال مرطوب	بعد از هر بار استفاده در صورت عدم استفاده هر هفته یکبار	پمپ انفوزیون
الکل ۷۰ درصد محلول رقیق شده سطوح اسپری ضدعفونی کننده سطوح با نظر شرکت سازنده دستمال مرطوب	بعد از هر بار استفاده در صورت عدم استفاده هر هفته یکبار	ونتلیاتور
با توجه به محل استفاده تی ابتدا با پودر شسته در صورت لزوم از وایتکس استفاده شود. آویزان و خشک گردد.	قبل و بعد از استفاده	تی ها